

Dräger DrugCheck 1200 STK Kits de prueba para la detección de drogas

Dräger DrugCheck 1200 STK: la manera más segura y económica de detectar el abuso de drogas. Con la ayuda de una prueba de saliva, puede detectarse el consumo de drogas de una manera fácil y rápida.



PRUEBA DE SALIVA DE BOLSILLO

El kit de prueba de saliva contiene todo lo necesario para realizar un análisis rápido in situ. Incluye un colector absorbente de saliva para la toma de muestras y un recipiente de tampón para la preparación. Para el análisis no se requiere ningún otro medio auxiliar: puede leer los resultados directamente de la tira de prueba.

EVALUACIÓN VISUAL DE LOS RESULTADOS

Si la tira de prueba muestra una línea de control roja, significa que la prueba ha funcionado y todos los resultados están listos. Solo tiene que evaluar las líneas con la ayuda de una lista disponible en las instrucciones de uso.

DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE HASTA SIETE DROGAS

Dräger pone a su disposición distintos kits de prueba, diseñados respectivamente para las combinaciones de sustancias más corrientes. Solo elija el kit de prueba que mejor le convenga según lo necesite. El kit de prueba ha sido ideado para su uso en aplicaciones de diagnóstico y forenses y permite detectar hasta siete clases de drogas ilegales mediante una prueba de saliva. El resultado de la prueba está disponible en 10 minutos.

OTRA VENTAJAS:

- Seguridad contra manipulación: la toma de muestra mediante la prueba de saliva evita manipulaciones
- Límites de detección determinados por el instituto estadounidense SAMHSA



El kit de prueba de saliva está compuesto por un casete de plástico con dos tiras de prueba especiales para el análisis de saliva, un colector absorbente de saliva y un recipiente de tampón.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

DRÄGER DRUGCHECK 1200 STK

| Prueba para la detección de drogas en saliva, caja con 25 kits de prueba | | No. de pedido |
|--|--|---------------|
| 4 clases de sustancias* | AMP (75), BZO (10), COC (36), MET (75), MTD (15), OPI (30), THC (45) | 83 22 937 |
| 6 clases de sustancias* | AMP (75), BZO (10), COC (36), MET (75), OPI (30), THC (45) | 83 22 936 |
| 5 clases de sustancias* | AMP (75), COC (36), MET (75), OPI (30), THC (45) | 83 22 873 |

* Dräger DrugCheck puede detectar las siguientes sustancias:

AMP: anfetamina, BZO: benzodiazepinas, COC: cocaína, MET: metanfetamina, MTD: metadona, OPI: opiáceos, THC: cannabis, (las cifras entre paréntesis indican el nivel de corte en ng/ml)

SEDE PRINCIPAL GRUPO

DRÄGER

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

REGION CENTRAL

AND SOUTH AMERICA

Dräger Panama S. de R.L.
Complejo Business Park,
V tower, 10th floor
Panama City
Tel +507 377-9100
Fax +507 377-9130
contactcsa@draeger.com

ARGENTINA

D.S. Safety s.a.
Obispo Terrero 3030
C.P. 1642 San Isidro
Prov. de Buenos Aires
Tel +54 11 4735 2011

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel +55 11 46 89 49 44
Fax +55 11 41 91 35 08

CANADA

Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Ave
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905 821 8988
Toll-free +1 877 Dräger 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 905 821-2565
Toll-free Fax +1 800 329 8823

CHILE

Sim-S.A.
Pablo Aguirre
Domeyko 1784
Tel +56 2 707 5795

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 442 246-1113
Fax +52 442 246-1114

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
San Borja – Lima 41 (Perú)
Tel + 511 626 95 95
Fax + 511 626 95 73

USA

Draeger Safety, Inc.
101 Technology Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel +1 412 787 8383
Fax +1 412 787 2207

Fabricante:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemania